

Steri-Strip™ Premiers secours
pour la suture des plaies

Les sutures cutanées Steri-Strip™ sont des languettes adhésives destinées à fermer et protéger les coupures et les petites blessures. Doit être utilisée conformément aux indications du médecin ou du prestataire de santé dans le cadre du traitement des coupures et des blessures de petite taille, en association avec des sutures cutanées et des agrafes ou, après leur retrait, pour le soutien de la plaie. La languette respirante reste fermement en place pendant la cicatrisation de votre coupure.

Bandes de suture STERI-STRIP™

Mode d'emploi:

1. Nettoyez et séchez la peau. Retirez les poils excédentaires.
2. Pliez une extrémité de la protection et séparez les languettes.
3. Rapprochez les lèvres de la plaie avec les doigts. Collez la languette adhésive sans tension, en exerçant une pression légère mais ferme. Lissez du centre vers l'extérieur.
4. Positionnez les autres languettes à environ 3 mm l'une de l'autre.
5. Pour améliorer l'adhérence, des sutures supplémentaires peuvent être appliquées parallèlement à la plaie et à environ 12 mm de ses extrémités.

Pour la retirer : Tout en retenant la peau, détachez délicatement la suture cutanée, à partir de l'extérieur vers le centre de la plaie.



Contre-indications :

• N'utilisez pas la suture lorsqu'une adhérence satisfaisante ne peut être obtenue en raison de la présence de liquide dans la plaie, de sébum, d'humidité ou de poils. • N'utilisez pas la suture sur des plaies souillées ou infectées, ou sur des blessures par perforation. Si vous remarquez l'un des signes d'infection suivants, veuillez consulter votre médecin : fièvre, douleurs, gonflements, démangeaisons, éruptions cutanées ou sensations de brûlure. • N'utilisez pas la suture pour les plaies très ouvertes dont les lèvres ne peuvent pas être facilement rapprochées l'une de l'autre avec les doigts. • N'utilisez pas la suture comme dispositif de fixation, notamment pour maintenir un tube en place.

Mises en garde : Pour limiter les risques d'infection, ne réutilisez pas les languettes.

Précaution :

• Comme pour tout produit adhésif appliqué sur la peau, un petit pourcentage de personnes peut connaître une irritation, une décoloration ou une lésion de la peau pendant l'utilisation ou le retrait du produit. • La tension causée par un œdème postopératoire, le mouvement du corps ou des articulations ou l'application de sutures cutanées en tension peut provoquer des lésions cutanées, y compris la formation d'ampoules ou la perte d'adhérence. • L'utilisation du produit conjointement avec d'autres produits adhésifs peut provoquer des ampoules ou des lésions cutanées. • Si la blessure est profonde et soignée abondamment, recherchez immédiatement une assistance médicale. • Ce produit n'est pas conçu, vendu ou destiné à être utilisé autrement que comme indiqué. Veuillez signaler tout incident grave lié à ce dispositif à 3M et aux autorités locales compétentes.

Lisez toujours l'étiquette. Utilisez le produit conformément aux instructions.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Date de publication : juin 2022, rév. 3

Stockage / durée de conservation / mise au rebut

À conserver à température ambiante. Ne pas stocker le produit dans des environnements chauds et/ou humides. Ne pas utiliser le produit si la date d'expiration est dépassée ou si celle-ci est manquante ou illisible. Mettre au rebut conformément à la réglementation locale.



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE